



Microbiología

MYCOFAST® REVOLUTION 2



Diagnóstico de micoplasmas urogenitales

MÉTODO DIRECTO



EXCELENTE DESEMPEÑO AUN EN LAS SITUACIONES MAS EXIGENTES

25 det.

Detección, Cuantificación, Identificación y Antibiograma de U urealyticum y M hominis

- ◆ Diagnóstico completo en un producto Todo-en-1
- ◆ Compatible para su uso con medios de transporte y Amies
- ◆ Manejo optimizado de coinfecciones
- ◆ Antibióticos que cumplen con las recomendaciones mundiales
- ◆ El umbral patológico correcto probado para cada tipo de muestra
- ◆ Resultados rápidos para los médicos
- ◆ Lectura visual colorimétrica

MYCOFAST® REVOLUTION 2



► VENTAJAS

◆ Diagnóstico completo en 24h*

- ◆ Detección, Cuantificación
- ◆ Identificación
- ◆ Antibiograma

◆ Desempeño vanguardista

- ◆ Detección y cuantificación de *U. urealyticum* a 10^3 , 10^4 y $\geq 10^5$ UCC/mL
- ◆ Detección y cuantificación de *U. hominis* a $\geq 10^4$ UCC/mL
- ◆ El umbral patológico correcto probado por cada tipo de muestra.

◆ Especificidad

- ◆ Medios de crecimiento selectivos para cada especie analizados por separado

Confiabilidad

- ◆ 5 antibióticos (LVX / MXF / E / CM / TE) probados de acuerdo con directrices del CLSI (Instituto de estándares clínicos y de laboratorio)
- ◆ Doxiciclina agregada al panel

Resultados rápidos

- ◆ Activador de crecimiento integrado para *M. hominis*

◆ Fácil de usar


- ◆ Reactivos listos para uso
- ◆ Cada pocillo precargado con medio de cultivo
- ◆ Lectura colorimétrica visual
- ◆ No se requiere instrumentación

◆ Flexibilidad y seguridad

- ◆ Medio de transporte optimizado: muestras conservadas hasta 72 horas antes del análisis
- ◆ Sistema de cierre de clip-on para las charolas.

► PROCEDIMIENTO

1 Inoculación del medio de transporte

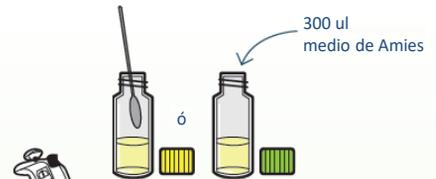

2 Inoculación de las charolas de MYCOFAST® Revolution 2



3 Incubación 24h a 37°C

4 Ejemplos de Resultados



*Lectura de todas las muestras en 24h. Lea únicamente muestras líquidas que tengan resultados negativos en 24 horas



: ELITech Microbio (France)



Diagnóstico Innovación y Asesoría S.A. de C.V.

La Quemada 226, Colonia Narvarte, c.p. 03020, Ciudad de México

Tels: 01 (55) 5534 6824, 5534 7112, 5534 7157, 5534 7398

comercial@diasodecv.com